

Universal komprimerende kryoterapienhet for kne

FORDELER VED KRYOTERAPI

- Begrenser blødning og hematom i popliteal fossa
- Lindrer smerte
- Reduserer ødem
- Kompatibel med dagkirurgi
- Enkel å bruke hjemme



Excell' ICE



Excell'ICE kuldesett kombinerer kryoterapi med modulert statisk kompresjon ved hjelp av en inflasjonspumpe.

Den er enkel å påføre med en teknologi som består av vekselvis komprimerende kulde under restitusjon og/eller heling, og anbefales ofte i dagene etter en skade eller etter en operasjon.

Det er velkjent at ekstern statisk kompresjon med is øker graden av kjøling på hudoverflaten.

Et unikt nytt konsept hvor kompresjonskammeret er direkte integrert i kuldepakningen, noe som gjør den mye enklere å bruke. Denne nye teknologien gjør det enklere å utføre restitusjonsøker på 20–30 minutter med kryoterapi og kompresjon. Disse bærbare enhetene er svært praktiske å bruke hjemme eller på reise.

For idrettsutøvere vil dette lindre smerter i muskler og skjelett øyeblikkelig etter kamper og konkurranser, slik at de kan restitueres optimalt, og dermed redusere tiden de tilbringer ute av konkurranser på grunn av smerte, skader, utmattelse osv.



Anbefalt bruk:

20-minutters økter hver 4. time

Første økt på operasjonsstuen etter bandasjering

Laget i Europa



Medisinsk
utstyr



I samsvar med
EU-kravene

INDIKASJONER

- Postoperativ behandling
- Smertestillende behandling
- Idrettstraumatologi (forstuing, rift ...)
- Etter rehabiliteringsøkt ...

KONTRAINDIKASJONER

- Allergi mot kulde
- Ufølsomhet for kulde
- Raynauds syndrom
- Kryoglobulinemi
- Arteritt
- Diabetes
- Polyartritt

Excell' ICE



Kryosett for kne

Vi introduserer kryosett for kne, en nedkjølingsløsning for kneet som er utrolig enkel å påføre. Den kommer i én universalstørrelse som passer alle, og vil passe ethvert kne. Settet inneholder både ① bakre ② og fremre kuldepakninger som gir full dekning av kneet. Den innovative utformingen kombinerer kuldeterapi med kompresjon i ett praktisk stykke. Få optimal kompresjon med den medfølgende manuelle pumpen ③.

Bevegelig knestøtte

Den bevegelige knestøtten i én størrelse er enkel å sette på kneet. Fleksjonsvinkelen for kneet kan justeres eller blokkeres i en bestemt vinkel. Den anbefales etter kneoperasjon eller skade.



Trygg, bevegelig knestøtte (full pakke inkludert kryosett)
Ref. ORT20GEN-A1P

Kryosett for kne (uten støtte)
Ref. ORT40PACK-G



Orthonov

3 rue de Villebon - 91160 Saulx-les-Chartreux - France
Telefon: +33 1 60 13 65 73 - E-post: contact@orthonov.com
SIRET: 820 720 068 00023 / VAT: FR01820720068

Distribueres av: **Ortomedic AS**

Vollsveien 13C, 1366 Lysaker, Norway
Telefon: +47 67 51 86 00
E-post: ortomedic@ortomedic.no